

ZENCHROMA®

OPAQUER: materiał uzupełniający

Przy odbudowach klasy III i IV, w sytuacji ograniczonego otaczającego uzębienia, zaleca się stosowanie materiału Zenchroma wraz z OPAQUER jako materiału uzupełniającego. Funkcją OPAQUER jest ograniczenie wpływu ubytku na dopasowanie koloru (shade matching).



Przed / krok 1



Aplikacja Opaquera / krok 2



Wypełnienie Zenchroma / krok 3



Przed

Po

Kod Produktu

PRD.100.01.ZENCHRM.UNIZENCHROMA - wkład uzupełniający kompozytu uniwersalnego

Szczegóły opakowania
• 1x 4gr Refill (Universal)

PRD.100.01.ZENCHRM.OPZENCHROMA - wkład Opaquer do kompozytu uniwersalnego

Szczegóły opakowania
• 1x 4gr Refill (Opaque)

PRD.100.01.ZENCHRM.COM.UNI - kapsułka / kompiula kompozytu uniwersalnego

Szczegóły opakowania
• 20 x 0.30 gr Compile / Capsule



tel: 63 244-55-77
kom: 504-036-768
kom: 535-455-415

www.equadent.pl

Polub nas na Facebook oraz Instagram
Korzystaj z unikalnych promocji!



email: naszebiuro@equadent.pl

Kesselbodenstraße 5, 85391 Allershausen / GERMANY • Tel: 0049 8166 389 9 820 • Fax: 0049 8166 389 9 821 • www.presidentdental.de • info@presidentdental.de

przestań marnować czas

zenchroma
One Shade Universal Composite



NOWOŚĆ



wszystkie odcienie w jednej strzykawce

ZENCHROMA®

Kompozyt uniwersalny / instrukcja stosowania

Zenchroma jest światłoutwardzalnym kompozytem mikrohybrydowym z ultradrobny, radiopacyjnym wypełniaczem, charakteryzującym się wysoką zdolnością adaptacji kolorystycznej do każdego odcienia zęba, na który jest aplikowany.

Zenchroma posiada zdolność odwzorowania kolorów odpowiadających 16 odcieniom skali VITA classical przy użyciu jednego odcienia materiału. Materiał dopasowuje kolor poprzez imitację ścian ubytku otaczających odbudowywany ząb. Dzięki temu Zenchroma eliminuje konieczność doboru koloru, skraca czas leczenia oraz ogranicza potrzebę posiadania wielu odcieni kompozytu w gabinecie.

Zenchroma jest dostępna w strzykawkach i kapsułkach. Kapsułki są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie należy ich ponownie używać, ponieważ uniemożliwia to wykluczenie kontaminacji oraz formowania się zarazków.

1 SKŁAD

Szkło w postaci proszku, diuretan dimetakrylan, dwutlenek krzemu, Bis-GMA, tetrametylen dimetakrylan.

2 CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ WYPEŁNIACZA


75% wagowo (53% objętościowo) nieorganicznego wypełniacza (0,005 - 3,0 μm)

3 WSKAZANIA

- ✓ Odbudowy bezpośrednio w klasach I, II, III, IV I V
- ✓ Wkłady, nakłady i licówki
- ✓ Poszerzone szczeliny i diastemy
- ✓ Szynowanie rozchwianych zębów
- ✓ Korekta kształtu i koloru dla poprawy estetyki

4 SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do leczenia oczyścić ząb pastą polerską bez fluoru. Nałóż Zenchromę do ubytku techniką warstwową.

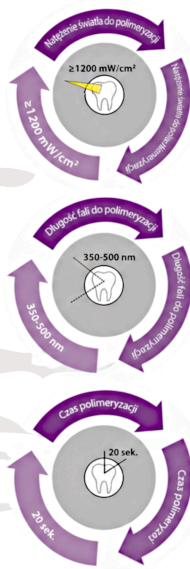

ZENCHROMA®

Porównanie właściwości fizycznych

	President Dental	Konkurencja
	zenchroma	Odpowiednik preparatu
Odporność na zginanie (MPa)	150	107
Moduł sprężystości (GPa)	12655	9524
Odporność na ściskanie (MPa)	479	394
Twardość Vickersa po 24h (MPa)	690	610

Zalety

- ✓ Wysoka estetyka rekonstrukcji
- ✓ Skrócony czas zabiegu
- ✓ Zwiększona efektywność kliniczna
- ✓ Ograniczenie konieczności stosowania rzadko używanych odcieni
- ✓ Transparencja na poziomie 8%
- ✓ Idealna integracja kolorystyczna wypełnienia z tkankami zęba
- ✓ Jeden materiał umożliwi uzyskanie wielu odcieni
- ✓ Odcień automatycznie adaptuje się do naturalnej struktury zęba

Przypadki kliniczne fot. dr Ruslan Mansurov

Wiele różnych odcieni

Krok 1 - wytrawianie

Krok 2 - adhezja

Krok 3 - aplikacja ZenChroma

Krok 4 - modelowanie i opracowanie

Krok 5 - wykończenie

Krok 6 (opcjonalnie) - do indywidualizacji charakterystyki można zastosować barwniki Zenit Color oraz krążki polerskie Novatwist o wysokim polysku

wszystkie odcienie w jednej strzykawce