


INSTALACJA



Fot. 1. Ukazuje instalację w fotelu Dental EZ. Urządzenie jest umieszczone na podłodze obok fotela. Może także być umieszczone wewnątrz skrzynki przyłączeniowej na podłodze, jeśli pozwala na to miejsce. Można wybrać dowolną lokalizację, która jest wygodna. Przedstawione tutaj urządzenie posiada 5/8 calowe nylonowe złączki z czerwonymi zaślepkami z winylu. W niektórych instalacjach wąż HVE może zostać przemieszczony na zewnątrz fotela. Zapięcia na rzep mogą być użyte do zamontowania urządzenia na fotelu stomatologicznym, stabilizując urządzenie na podłodze.

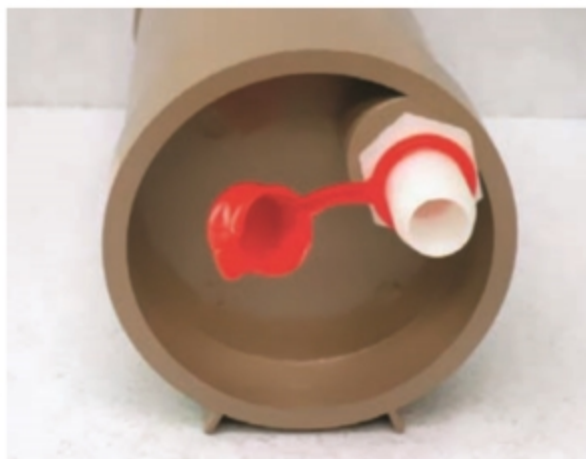

Fot. 2. Pokazuje stronę napływu MD. Ta strona separatora jest podłączona do linii HVE pochodzącej od pacjenta. Montujemy czerwoną osłonę z winylu nad portem dopływowym 5/8 cala separatora. Gdy separator jest załadowany odpadkami i wymaga wymiany, czerwona osłona z winylu jest umieszczona nad portem, aby zapobiec wyciekowi zanieczyszczeń z separatora.



Fot. 3. Ukazuje stronę wypływu MD. Port odpływu jest zgodny z długą osią separatora. Ta strona separatora jest podłączona do źródła próżni. Montujemy czerwoną osłonę z winylu nad portem wylotowym 5/8 cala separatora. Gdy separator jest załadowany odpadkami i wymaga zmiany, czerwona osłona z winylu jest umieszczona nad portem, aby zapobiec wyciekowi pozostałości z separatora.