




Dozownik automatyczny Sterisol

Bezdotykowy dozownik ścienny z czujnikiem ruchu.

- dostosowany do dozowania preparatów w workach o pojemności 700 ml
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Dozownik automatyczny Sterisol

Bezdotykowy dozownik ścienny z czujnikiem ruchu.

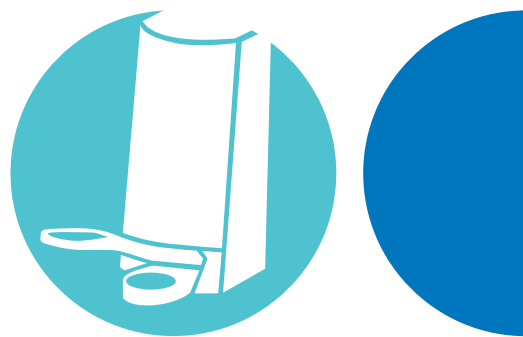

PODSTAWOWE CECHY

- dedykowany do dozowania preparatów myjących, dezynfekujących i pielęgnujących Systemu Sterisol
- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
- montaż za pomocą wkrętów lub trwałej taśmy montażowej
- dozowanie polega na uruchomieniu mechanizmu dozującego za pomocą czujnika ruchu
- zasilany przez baterie lub zasilacz sieciowy
- wyposażony w niebieską lampkę sygnalizującą wyczerpanie baterii
- w zestawie: obudowa dozownika, płytki montażowa, przezroczysta pokrywa, taśma montażowa, wkręty
- bezdotykowe dozowanie preparatów zapewnia zachowanie najwyższego stopnia higieny

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYCIA

Montaż przy użyciu taśmy

- Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię, na której będzie montowany dozownik.
- Na płytkę montażową dozownika nakleić taśmę.
- Przykleić dozownik do właściwej powierzchni.

Montaż przy użyciu wkrętów

- Wywiercić otwory zgodnie z rozmieszczeniem na płytce montażowej.
- Płytkę montażową zamontować do właściwej powierzchni przy użyciu wkrętów.
- Do płytki zamontować dozownik.
- Oburącz unieść do góry przezroczystą pokrywę dozownika.
- Na górze obudowy dozownika znajduje się kasetka na baterie. Otworzyć ją w kierunku do siebie i włożyć 4 baterie, a następnie zamknąć.
- Przez ramię ze stali nierdzewnej włożyć zawór-zastawkę worka w specjalną obręcz na obudowie dozownika. Następnie górną część worka, w której znajdują się otwory zawiesić na wypustkach obudowy dozownika.
- Sprawdzić czy worek z preparatem jest prawidłowo włożony do dozownika.
- Zamknąć oburącz przezroczystą pokrywę dozownika.

WYMIARY

wymiary obudowy dozownika
(wys. x szer. x głęb.):
228 mm x 117 mm x 130 mm

AKCESORIA WYMIENNE

taśma montażowa, płytki montażowa, przezroczysta pokrywa

OPAKOWANIA

dozownik automatyczny Sterisol – 1 szt.

PRODUKTY DEDYKOWANE

MYCIE

Sterisol Äkta Liquid Soap
Sterisol Ultra Liquid Soap
Sterisol Sense Liquid Soap
Sterisol Ultra Hair & Body

DEZYNFEKCJA

AHD 1000 Sterisol
Phago'gel Sterisol
Sterisol Preop
Sterisol Ethanol

PIELĘGNACJA

Sterisol Soft Skin Creme
Sterisol Gentle Skin Lotion

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska

T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o.: 2202-01

WYTWÓRCA:

Sterisol AB

BOX 149

592 23 Vadstena • Szwecja

sterisol.se