

PULPDENT®

EMBRACE™ Varnish

Lakier - 5% Fluorek sodu z ksylitolem zawierającym wapń i fosfor (CXP™)

EMBRACE™ Varnish jest opartym na żywicy lakierem fluorowym, który równomiernie uwalnia jony wapnia, fluoru i fosforu w czasie 4 godzin lub dłuższym. Sole wapnia i fosforu są otoczone warstwą ksylitolu. Ekspozycja na ślinę rozpuszcza ksylitol, uwalniając jony wapnia i fosforu które w sposób ciągły zaczynają reagować z jonami fluoru w ślinie formując ochronny fluoroapatyt na zębach.

EMBRACE™ Varnish zawiera 5% fluorek sodu co odpowiada 22,600 ppm fluoru (22.6 mg fluoru/mL). Materiał jest w odcieniu zęba. Szybko wysycha formując gładki, cienki film na powierzchni zębów.

OPIS PRODUKTU

Lakier z 5% Fluorkiem sodu z ksylitolem, wapniem i fosforem

WSKAZANIA

EMBRACE™ Varnish leczy nadwrażliwość, uwalniając jony fluoru, wapnia i fosforu, które wytrącają się na kanalikach zębinowych i zamykają je oraz wypełniają powierzchniowe, nie próchnicowe ubytki szkliwa.

PRZECIWWSKAZANIA

Wrzodziejące zapalenie dziąseł oraz zapalenie jamy ustnej

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ogranicz możliwość połknięcia aplikując tylko tyle ile jest konieczne do pokrycia powierzchni zębów cienkim filmem. Dorośli pacjenci powinni powstrzymać się od przyjmowania suplementów z fluorem przez 24 godziny po zastosowaniu preparatu, a dzieci, przez 2-3 dni.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Użyj tyłu nakrętki by przebić folię na tubce.
2. Osusz zęby za pomocą gazika. Najlepiej jest jeśli zęby są choć trochę oczyszczone, nie ma potrzeby piaskowania.
3. Na bloczku albo na tacce do mieszania rozprowadź 0.25 ml lakieru gdy aplikujesz go dziecku, lub 0.4 ml w przypadku aplikacji u dorosłego.
4. Używając aplikatora, nakładaj lakier cienką warstwą na wybrane powierzchnie zęba. Zużycie całej dawki lakieru nie jest konieczne.
5. Najlepiej jeśli pacjent powstrzyma się od jedzenia lub picia ciepłych płynów lub alkoholu przez 3-4 godziny po leczeniu. W dalszej części dnia, korzystne jest jedzenie miękkich pokarmów. Poinstruj pacjentów by nie szczotkowali zębów przez minimum 4 godziny.
6. EMBRACE Varnish może być usunięty poprzez szczotkowanie i użycie nitki dentystycznej.

OSTRZEŻENIA

- W razie inhalacji EMBRACE Varnish może podrażniać drogi oddechowe, a także oczy lub skórę w przypadku kontaktu. Varnish może uczulić w razie przedłużonej ekspozycji lub powtarzającego się kontaktu. Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki celem uzyskania dodatkowych informacji.
- Profesjonalni użytkownicy powinni nosić ochronne okulary i rękawice. Umyj ręce po użyciu. W razie konieczności w gabinecie powinna być możliwość przemycia oczu wodą.
- EMBRACE Varnish nie zawiera soi ani glutenu. Zawiera przetworzony ekstrakt z drzewa piniowego, nie zawiera ekstraktu z orzechów pinii. Pacjenci z alergiami powinni skonsultować użycie preparatu ze swoim lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, skażenia materiału i źródeł zapłonu.
- Data przydatności do użycia nieotwartego produktu: 2 lata od daty produkcji.
- Zakręcaj natychmiast po użyciu jeśli używasz wersji w tubce.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi odpowiedzialnemu, w regionie, w którym miał miejsce incydent. Raporty o poważnych zajściach wysyłaj do:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Uwaga: Lista materiałów obecnych w tym wyrobie dostępna w Karcie Charakterystyki Wyrobu.