

PULPDENT®
PREP-RITE™ RC

Prep-Rite RC to 15% żel EDTA zbuforowany do neutralnego pH. Zawiera nadtlenek, który działa musująco i ma lepką konsystencję, łatwo utrzymuje się na pilniku. Podczas oczyszczania kanału korzeniowego Prep-Rite RC jest skutecznym materiałem wiążącym wapń, odwapnia ściany kanału korzeniowego oraz działa jako środek poślizgowy, który minimalizuje łamanie pilników. Preparat Prep-Rite jest na bazie wody i łatwo wypłukuje się z kanału.

OPIS PRODUKTU

15% lepki żel EDTA nawilżający kanał korzeniowy oraz środek chelatujący z nadtlakiem

WSKAZANIA

Pomoc w opracowaniu kanałów korzeniowych podczas leczenia endodontycznego

PRZECIWWSKAZANIA

Nie jest to trwały preparat do wypełniania kanałów korzeniowych

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Zawsze zakładaj koferdam.
2. Zdjąć nasadkę ze strzykawki.
3. Nałóż Prep-Rite RC na podkładkę. Zakręcić strzykawkę natychmiast po użyciu.
4. Zanurz pilnik w żelu Prep-Rite. Nabierz Prep-Rite na narzędzie kanałowe
5. Opracuj kanał i przepłucz w zwykły sposób. Ponownie nałóż Prep-Rite RC i powtarzaj w razie potrzeby, aż kanał zostanie powiększony i ukształtowany zgodnie z potrzebami.
6. Dokładnie wypłucz kanał.

Uwaga: Przed użyciem u każdego pacjenta na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku należy nałożyć jednorazowe rękawy ochronne. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie:

<https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

OSTRZEŻENIE

Unikaj kontaktu z oczami.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, skażenia materiału i źródeł zapłonu.
- Data przydatności do użycia nieotwartego produktu: 2 lata od daty produkcji.
- Zakręcaj natychmiast po użyciu.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi odpowiedzialnemu, w regionie, w którym miał miejsce incydent. Raporty o poważnych zająciach wysyłaj do:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Uwaga: Lista materiałów obecnych w tym wyrobie dostępna w Karcie Charakterystyki Wyrobu.