

PULPDENT®

Sparkle™ Diamond Polishing Paste – Diamentowa Pasta Polerska

OPIS PRODUKTU

Sparkle został specjalnie opracowany, aby uzyskać niezrównane rezultaty polerujące na porcelanie, złocie, metalu i kompozytach. Nie rozpryskuje się i łatwo się zmywa.

WSKAZANIA

Do polerowania porcelany, złota, metali, kompozytów na wysoki połysk

PRZECIWSKAZANIA

Nie jest przeznaczona do czyszczenia szkliva

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Nałożyć na powierzchnię lub odbudowę za pomocą pędzelka, gumki lub koła filcowego.
2. Poleruj do uzyskania wysokiego połysku.
3. Zmyć wodą.
4. Trzymaj strzykawkę zakrytą, gdy nie jest używana.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Unikaj kontaktu z oczami.