

XyliMelts®

Po prostu naturalne. Bez sztucznych aromatów, sztucznych barwników i produktów odzwierzęcych.



Do kupienia w aptekach i naszym sklepie internetowym.

Wystarczy podać nazwę lub numer produktu i wybrać smak delikatnie miętowy lub neutralny (delikatnie słodki).

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami.

- www.xyli melts.com.pl
- kontakt@xyli melts.com.pl
- @xyli meltspolska
- XyliMelts Polska
- XyliMelts Polska



Skład: Ksylitol (550 mg), guma arabska, guma celulozowa, stearynian magnezu, naturalna mięta, wodorowęglan sodu, węglan wapnia.

Badania na stronie: www.oracoat.com/clinical-studies



Quest Products, LLC
8201 104th Street
Pleasant Prairie,
WI 53158
USA




Progressdent sp. z o.o.
kontakt@xyli melts.com.pl



Medinn Tec sp. z o.o.
ul. Żołnierzy Lenino 7
61-694 Poznań,
Polska

EC REP

Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +32 273 2 59 54
E-Mail: mail@obelis.net

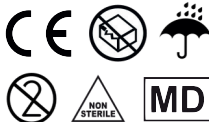

W przypadku ostrych stanów zapalnych lub urazów w obrębie jamy ustnej czy zębów, poważnych zaburzeń połykania, a także alergii lub nietolerancji na składniki preparatu XyliMelts, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. W razie wystąpienia poważnego incydentu związanego ze stosowaniem XyliMelts, prosimy o zgłoszenie go producentowi oraz właściwemu organowi w państwie członkowskim UE, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

REF ORA00

LOT

Najlepiej spożyć przed: data na blistrze



DELIKATNA MIĘTA
Bez dodatku cukru, z ksylitolem

XyliMelts®

Samoprzylepne pastylki® nawilżające

Skuteczne i naturalne rozwiązanie na suchość jamy ustnej



WYPRÓBUJ
DARMOWĄ
PRÓBKĘ
JUŻ TERAZ!

XyliMelts - przyjemna świeżość i długotrwałe nawilżenie



Naturalne uczucie nawilżenia w jamie ustnej

XyliMelts trzykrotnie zwiększa wilgotność w jamie ustnej podczas uczucia porannej suchości.*



Dyskretna, praktyczna i skuteczna

Dzięki opatentowanej technologii, pastylka samoprzylepna XyliMelts jest idealna do stosowania podczas snu, ponieważ nie ma ryzyka przypadkowego połknięcia. Nie przeszkadza podczas mówienia lub jedzenia czy picia.



Działanie długoterminowe

Pastylka samoprzylepna uwalnia się w jamie ustnej powoli. W ciągu dnia jej działanie wynosi **do 4 godzin**, a podczas snu nawet **do 8 godzin**.



Bezpieczna dla jamy ustnej

Ksylitol i węglan wapnia pomagają ograniczać odkładanie się płytki nazębnej oraz zapobiegać próchnicy, wspierając zdrowie dziąseł. XyliMelts pomaga neutralizować kwasy w jamie ustnej i utrzymywać prawidłowe pH.

Jak stosować XyliMelts?



Umieść brzową stronę pastylki na dziąsle lub na zewnętrznej powierzchni zęba tak, aby biała dotykała policzka.

Przesuń pastylkę językiem w miejsce, gdzie będzie Ci wygodnie. Odczekaj około 10 sekund, aby dobrze się przykleiła. Jeśli jednak z jakiegoś powodu chcesz ją przesunąć, możesz to zrobić językiem.



Stosowanie:

W ciągu dnia: według potrzeby.

Podczas snu: zaleca się stosowanie 2 pastylek na raz - po przeciwległych stronach jamy ustnej (góra-dół/lewa-prawa), w celu zapewnienia równomiernego nawilżenia.

Ostrzeżenie:

Nie przyklejać do podniebienia. Pastylka przeznaczona jest do umieszczenia wyłącznie na zęby lub na dziąsła. Nie podawać dzieciom poniżej 5 roku życia. Chronić przed dziećmi i zwierzętami, szczególnie psami.

Przetestuj bezpłatną próbkę i odkryj działanie naszego produktu!



Stomatolog potwierdza**

Regularne stosowanie XyliMelts naprawdę się opłaca. Ponad 1168 ankietowanych stomatologów potwierdza, że XyliMelts jest jednym z najbardziej efektywnych środków stosowanych w walce z suchością jamy ustnej.



Zobacz film instruktażowy!

*Badania: Burgess, J. & Lee, P. (2012) XyliMelts time-release adhering discs for night-time oral dryness. Int J Dent Hygiene 10, 2012; 118-121 DOI: 10.1111/j.1601-5037.2011.00532.x

**Badania: Christensen, Gordon, DDS, MSD, PhD, Provo, Utah; Svirsky, John, DDS, MEd, Richmond, Virginia; Clinicians Report März 2016, Vol. 9, Issue 3.